ダイバーにとって必須の「耳抜き」。

息み過ぎによる耳の損傷を防ぎ、安全に耳抜きを訓練するツールとして用いられています。



オトヴェント 耳抜き練習用グッズ

[MU-6000] オトヴェント 1 × 1 セット 商品内容: ノーズピース1個 + バルーン1個 ¥ 1.200(稅込¥1,320)

[MU-6001] オトヴェント 1 × 5 セット 商品内容: ノーズピース1個+バルーン5個

¥ 2.000(稅込¥ 2,200)

[MU-6002] オトヴェント 1 × 10 セット

¥ 2,500(稅込¥2,750)

商品内容: ノーズピース 1 個 + バルーン 10 個

商品内容:バルーン5個

オトヴェントとは・・・ 主に滲出性(しんしゅつせい)中耳炎の治療のため、耳管を通気するために用いられる自己耳管通気機器です。 近年、オトヴェントによる耳管通気の基本原理が、ダイビングにおける耳抜きと同じであることにより、ダイバーの耳抜き練習用のグッズとして用いられています。 ダイバーの最初の関門、最大の悩みの一つが「耳抜き」。耳抜きが苦手というダイバーは少なくありません。耳抜きは弱すぎても強すぎてもダメ。オトヴェントは 適度なカ加減、タイミングを練習することができます。練習後もダイビング前にオトヴェントを使用し耳管通気を行うことで耳抜きが容易になります。

それは鼓膜の内側の中耳が陰圧となって、中耳内に水が貯まる状態(滲出性中耳炎)が生じているからです。 なぜ、オトベントを使うのでしょう? オトベントは耳管(耳とのどをつなぐ管)を開き、中耳内圧と外気圧とを等しくする働きがあります。

- 初心者・ブランクダイバーが上手な耳抜きを身に付けるため、またその際の指導の補助に!
- 風船の膨らみを目で確認しながら耳抜きすることで、適切な息み方を身に付けられる!
- バルーンが圧力を逃がすので、息み過ぎによる耳の損傷リスクを回避、安全に練習ができる!



オトヴェント中

風船が膨らむように息むと耳管 が開き、これが耳抜きの始まり です。

オトヴェント後

中耳に空気が送り込まれて鼓膜内外の圧力差が解消します。 この反復練習が耳抜き上達のポイント!

使用方法 (1) 使用前は鼻をよくかんで下さい。

[MU-6003] オトヴェント バルーン 5 個セット ¥ 1,000 (税込¥1,100)



-ズピ--スとバルーンを つなぎます。



鼻から声を出すような感覚でゆっくりと2秒間か -プフルーツ大ぐらいの大きさまで膨らま せて下さい。



片鼻を指で塞ぎ、逆鼻に -ズピースを当てます。



膨らんだら息を止めず、同じ強さの力を2秒間かけ続けてグレープフルーツ大の大きさを保っ て下さい。





SCUBA DIVING the ultimate ear protection-for all ages...







¥ 4.500 (税込¥ 4,950)





サイズ: T / XS / MS / S / M / L / XL / XXL

耳抜きを簡単に、スクイズの痛みが和らぐ画期的な耳栓

ドックスプロプラグはスコットバルブと呼ばれる特殊な通気孔により、潜行時の 急激な圧力変化を緩やかにし、浮上時には膨張した空気が通気孔から自然に 抜けていきます。

また、耳栓をしていても水中で音を聞くことを可能にしています。 冷たい水が敏感な鼓膜に触れることにより感じる痛みを和らげます。 海難救助や作業潜水での汚染対策にも有効です。

[MU-2636] FM-81 ドックスプロプラグ フィッティングキット ¥ 8.000 (税込 ¥ 8,800)

サイズ計測用サンプルセット

ドックスプロプラグ 耳栓 サイズ





サイズ	寸法
TINY	18-19mm
X SMALL	20-22 m m
M SMALL	21-23 m m
SMALL	2 3 – 2 5 m m
MEDIUM	2 4 - 2 6 m m
LARGE	2 6 – 2 9 m m
X LARGE	29-32 m m
XX LARGE	3 2 – 3 4 m m